

Ophtecs

cleadew
SL

NEDERLANDS | Aanwijzingen voor gebruik

Systeem voor het desinfecteren, reinigen en bewaren van harde contactlenzen die gas doorlaten.

VOOR SCLERALE CONTACTLENZEN

Was uw handen zeer goed met een milde zeep alvorens uw lenzen aan te raken.

1 DESINFECTEREN, REINIGEN EN NEUTRALISEREN

- Plaats een tablet voor neutraliseren en reinigen in de aangegeven positie (glauf) van de bijbehorende lenshouder. Zorg ervoor dat u alleen de bijbehorende houder gebruikt. Δe tablet op een andere positie dan de aangewezen positie plaatsen, kan tot een mislukte neutralisatie leiden, met een verkleuring van de lens als gevolg.
- Plaats de lenzen in de houders van de bijbehorende lenshouder.
- Vul de lenshouder tot de gemarkeerde lijn met de vloeistof voor desinfecteren.
- Sluit de deksel van de lenshouder en laat deze minstens vier uur staan.
- Controleer of de lenzen in vloeistof helder zijn.

2 LENZEN SPOELEN

- Gooi de vloeistof na het neutraliseren weg. Vul de lenshouder met ongebufferde, niet-conserverende, steriele zoutoplossing tot aan de gemarkeerde lijn. Sluit vervolgens de dop, en schud voorzichtig, door de lenshouder meer dan 10 keer om te keren. Δe vermijdt het gebruik van saline of MPS-oplossingen die natrium chloriet bevatten als conserveringmiddel of ontsmettingsmiddel.
- Gooi de oplossing uit het lenzenbakje weg en spoel de lenzen nogmaals op dezelfde manier.

3 LENZEN DRAGEN

- Verwijder de lenzen uit de lenshouders en zet ze in uw ogen.

LENZEN BEWAREN

- Bewaar de lenzen volgens de instructies van uw opticien.
- Wanneer de lenzen langer dan 24 uur niet worden gebruikt is het aanbevolen om de lenzen voor gebruik eerst opnieuw te reinigen en desinfecteren volgens de beschreven methode.

VOORZORGEN

- Volg de aanwijzingen voor gebruik nauwkeurig op om mogelijke ernstige infecties of beschadigingen aan het oog te voorkomen.
- Gebruik de vloeistof voor desinfecteren en de tablet voor neutraliseren en reinigen altijd in combinatie.
- Sluit de fles na gebruik goed.
- Gebruik altijd de componenten en het lenzenbakje van het cleadew SL-systeem.
- Gooi resterende vloeistof 90 dagen na het openen van de fles weg.
- Gebruik het product niet voor zachte contactlenzen.
- Voorkom vervuiling en besmetting en raak de punt van de fles niet aan.
- Vloeistof of tablet niet inslikken. Indien ingeslikt, direct veel schoon water drinken.
- Gebruik het product niet rechtstreeks in uw ogen. Indien het in uw ogen is gekomen, moeten de ogen direct met een ongebufferde, ongeconserveerde steriele saline-oplossing of een oogspoeling worden gespoeld.
- Gebruik geen tabletten die zijn beschadigd of verkeerd.
- Gebruik de vloeistof niet opnieuw. (De vloeistof overlijft na het onderhoud van de lenzen is geneutraliseerd en kan de lenzen niet meer desinfecteren). Gebruik de vloeistof niet opnieuw. (Dit kan leiden tot infectie van de ogen).
- Gebruik het product niet nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- Gebruik het product niet indien de fles of verpakking vuil of beschadigd is.
- Gebruik de oplossing niet indien deze troebel of verkeerd is en is een andere kleur dan oranje heeft.
- Draag de lenzen na het desinfecteren, reinigen en neutraliseren niet zonder de lenzen eerst met een ongebufferde, ongeconserveerde steriele saline-oplossing te hebben gespoeld.
- Gebruik het product niet met een andere vloeistof, tablet of farmaceutisch middel.
- Gebruik geen kraanwater voor het spoelen van lenzen of de lenshouder.
- Buiten bereik van kinderen houden.

BESTANDDELEN

[Vloeistof voor desinfecteren] STERILE A [Tablet voor neutraliseren en reinigen]
Povidon-ijodium (0.05%)
<Specifieke bestanddelen> Boorzuur

[Tablet voor neutraliseren en reinigen]
STERILE A

