

- Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare **cleadev** e conservarlo per riferimento futuro. Per evitare infezioni oculari, seguire sempre le istruzioni per l'uso.
- Non riutilizzare la soluzione. (Dopo il trattamento delle lenti, la soluzione è neutralizzata e non è più in grado di disinfettare. Per evitare infezioni oculari, non riutilizzare la soluzione).
- Se la soluzione non diventa arancione dopo avere aggiunto una compressa, eliminare la soluzione, lavare e asciugare il portallenti e ripetere le fasi di cura dall'inizio, come indicato nelle istruzioni per l'uso.
- Non indossare le lenti se il colore arancione persiste.
- Consultare uno specialista se sono state indossate lenti non neutralizzate.
- Prima di indossare le lenti, assicurarsi che non ci siano residui di colore né sulle lenti né nella soluzione. Se l'arancione è ancora visibile dopo 4 ore, dissolverlo scuotendo il portallenti. Se il colore resta, gettare la soluzione e ripetere le fasi di cura dall'inizio.
- Dopo ogni utilizzo, eliminare l'eventuale soluzione residua nel portallenti.
- Dopo ciascun utilizzo di **cleadev**, lavare il portallenti con soluzione salina sterile e lasciare asciugare all'aria aperta.
- I bambini non devono usare **cleadev** da soli; i genitori sono responsabili della loro cura quotidiana.
- Utilizzare solo con il portallenti specifico in dotazione con **cleadev**.
- Eliminare l'eventuale soluzione rimanente 3 mesi dopo l'apertura del flacone.
- Utilizzare sempre **cleadev** e **cleadev** insieme.
- Chiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Non utilizzare **cleadev** con lenti rigide gas permeabili.
- Non ingerire la soluzione o le compresse.
- Non toccare la punta di **cleadev** per evitare la contaminazione.
- Non utilizzare **cleadev** per disinfettare a caldo.
- Non utilizzare compresse danneggiate.
- Non utilizzare **cleadev** dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare la soluzione o la compressa se scolorita.
- Non utilizzare **cleadev** se il sigillo antimanomissione è danneggiato o assente.
- Non utilizzare acqua del rubinetto per conservare e ricaricare le lenti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare i portallenti in luogo asciutto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare.
- Non sostituire **cleadev** con un altro flacone.
- Non utilizzare **cleadev** con portallenti usati.
- Utilizzare sempre il portallenti fornito.
- Utilizzare la compressa immediatamente dopo l'apertura della confezione.
- Conservare sempre le compresse nella loro confezione in alluminio quando non utilizzate.
- Non cambiare il sistema di cura delle lenti a contatto senza aver prima consultato uno specialista.
- L'acido borico è tossico per la riproduzione e può ridurre la fertilità futura se assunto da bambini o causare danni a neonati se assunto da donne in gravidanza o durante l'allattamento. Sebbene questo prodotto contenga anche acido borico, la sua quantità è a una concentrazione tale da non rappresentare un pericolo per la salute. Questo prodotto è sicuro per l'uso da parte di bambini e donne in gravidanza o in allattamento, purché vengano seguite le istruzioni. La sensibilità alle sostanze chimiche varia da persona a persona. Per i soggetti sensibili, si raccomanda di sciacquare le lenti con soluzione fisiologica sterile prima di indossarle.

ISSUE DATE: 20180720
REVISE DATE: 20231115
5-20231115